



Mikrozyd AF

liquid

Mikrozyd AF

Tücher

**Rychlá
alkoholová
dezinfekce
ploch
a inventáře**

bez aldehydů



Profil

- **mikrobiologická účinnost**
proti bakteriím, vč. TBC a MRSA, mikroskopickým, kvasinkovým i vláknitým houbám, virům HBV, HCV, HIV, polio-, rota-, adeno-, Papova SV 40 virům
- rychle osychá, nezanechává stopy ani skvrny
- výborná snášenlivost s materiály, také s umělohmotnými
- decentní vůně a rychlý účinek 1-2 minuty
- optimální aplikační formy pro stacionář i terén-roztok i napuštěné ubrousky

Oblasti použití

Dezinfekce inventáře a malých ploch, vyšetřovacích lehátek, vozíků, obuvi a jiných ploch, kde lze očekávat zvýšené riziko přenosu infekce.

Způsob použití

Předměty a povrchy rovnoměrně postříkáme nebo otřeme namokro a necháme zaschnout. Přebytečné množství roztoku můžeme vysušit bezbarvou buničinou. Standardní množství pro plnou účinnost je 25 ml/m² postříkem nebo 15 ml/m postříkem s následným rozetřením ubrouskem.

Charakteristika

Složení

100 g roztoku obsahuje 25g etanolu (94%) a 35g 1-propanolu, prostředek na smáčení, aromatické látky
1 dóza (150 ks ubrousků) obsahuje 293g roztoku Mikrozid® Liquid

Chemicko-fyzikální údaje

(platí pro roztok)

vzhled čirá, bezbarvá kapalina
hustota cca 0,895
viskozita < 15 s
tepelně stabilní od -5°C do +40°C
pH-hodnota cca 6,0
bod vznícení 27°C
CE 0297

Bezpečnostní pokyny

Dráždí oči - při vniknutí ihned vypláchněte velkým množstvím vody. Hořlavý a výbušný - zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm. Chraňte před dosahem dětí. Nepoužívejte na alkohol citlivé materiály (např. akrylátové nebo polyakrylátové sklo). Bezpečné povolené množství v ovzduší - do 1.900 mg/m³ (TRGS 900).

Pracujte v dobře větratelných prostorách. Používejte osobní ochranné pomůcky (ochr. brýle nebo štít). Páry mohou způsobovat ospalost nebo nevolnost.

Expoziční časy

Bakterie, plísně	1 min.
MRSA	2 min.
TBC	1 min.
adenoviry	2 min.
HBV, HIV	1 min.
HCV, rotaviry	30 sec.
polioviry (AFNOR NF 72-180)	30 min.
Papova SV 40	30 min.
DGHM certifikát pro plochy a povrchy	5 min.
ÖGHMP certifikace 09/00	1 min.
Plně virucidní	30 min.
Omezeně virucidní	30 sek.

Balení

Roztok

250 ml láhev s rozstřikovačem	10 x 250 ml
250 ml náhradní náplň	10 x 250 ml
1 l láhev	10 x 1 l
10 l kanystr	1 x 10 l

Ubrousky

dóza 150 ks	10
sáček 150 ks náhr. náplň	20

Aplikační pomůcky

Mechanická rozstřikovací pumpa pro 1 l láhev. Klíč a uzávěr ke kanystru.

